

画像閲覧ソフト「Array AOC」取り扱い簡易説明書

◆動作環境 (カッコ内 Webブラウザでの閲覧の場合)

OS : Windows XP, Vista, 7
Web ブラウザ : Internet Explorer 6 以降
メモリ : 1.5GB以上

Windows XP, Vista
Internet Explorer 5.5 以降
512MB以上


Internet Explorer やWindows のバージョンによっては、動作しない場合があります。
動作不良の場合は、下記放射線課予約専用ダイヤルまで、ご相談ください。

◆起動方法

ディスクをパソコンのディスクドライブに入れてください。
しばらくすると自動で初期画面まで起動いたします。

※お使いのパソコンの設定によっては自動で起動しない場合がございます。

自動で起動しない場合の起動方法

1. マイコンピュータ内のディスクドライブ上でダブルクリック
(もしくは右クリック→開くを選択)
2. データ内の“Viewer”フォルダ内にある“AFC.exe”  をダブルクリック



初期画面

◆専用ビューワ操作方法

①表示コマ数の変更


ツールバー上の“フレーム”から変更できます。

②スカウト画像の設定


スカウト画像にしたい画像を選択して右クリックし、
“この画像をスカウト画像とする”を選択してください。

③検査を並べて表示させる

1. 同一検査の異なるシリーズを並べて比較する場合

“比較モード”  をクリックすると、同一検査が並べて表示されます。

2. 異なる検査の画像を並べて比較する場合

タイムライン上の検査マークの横側  をクリックすると、
異なる検査の画像を並べて表示できます。

真ん中  をクリックするとその検査のみが表示されます。

④動画データ(血管造影など)の表示

ツールバー上の“シネモード”をクリックすると、
動画データが再生されます。

◆画像のイメージ保存 (jpeg、bmp、tiffなど)

1. 保存したい画像上で右クリック
2. “この画像をファイル出力”をクリック
3. 保存先、ファイルの種類を選択

“8bitを超える画像は8bitに変換して保存”にチェックを入れて下さい。

◆終了方法

ディスクはビューワ画面、フォルダを閉じてから取り出してください。
画面を閉じずにディスクを取り出そうとすると、エラーが表示されることがあります。

◆より詳しい説明は、初期画面の から確認できます。

ご不明な点がございましたら、
放射線課 予約専用ダイヤル **086-276-5670** までご連絡ください

